

【検査にあたってのご注意】

唾液採取前30分は、飲食・喫煙・歯磨き(マウスウォッシュ)は行わないでください。
ウイルスが流れたり、食品や歯磨き粉等の成分が混ざってしまい、正しい検査が行えません。

<推奨>

2時間前に歯磨きをして口の中を清潔にし、食事や喫煙を控え、さらに唾液採取30分前からは飲み物も控えていただきますと正確性が高まります。

検査の手順

【手順1】

袋から唾液採取容器とファネルを取り出してください。

唾液採取容器の蓋をあけて、ファネルを使って唾液を採取してください。



1.5ml 目盛を目安に、
唾液を入れて
ください。唾液の量が少な
いと検査が
できないことがあります。

※使用したストローは破棄してください。



裏面へつづく ⇒

 新型コロナウイルス検査センター