

# フェイスシールドの取り扱い方について

フェイスシールドは、自分や仲間を新型コロナウイルス感染症から守るためのものです。給食の配膳中や検診の時、近距離で他の生徒と接する場面等で使用します。先生に指示された時以外も必要に応じて自己判断で着用してください。

①フェイスシールドのゴムの部分と、保管用のビニール袋に自分の名前を書いてください。表面の保護フィルムをはずしてから使用してください。

②フェイスシールドのスポンジ部分が額に当たるように着用します。また、フェイスシールドを着用している時もマスクは着けてください。

③フェイスシールドは自分でしっかり管理してください。使った日は、洗ったり、除菌シートやウェットティッシュで拭いたりして、清潔に使ってください。

④使用しないときは、保管用のビニール袋に入れて机の中に保管してください。

⑤フェイスシールドを着用すると視野が狭くなったり、シールドでけがをしたりすることがあるので、移動中や動きのある活動中は着用しないでください。また、火や熱を発生するものの近くでは使用しないでください。

⑥フェイスシールドを着用していて、気分が悪くなったり、体調に変化があったりした場合は、すぐにはずすようにしましょう。

